

## INSTRUCCIONES DE USO CÁNULAS DE GUEDEL



### ¿CÓMO ELEGIR EL MODELO POR LONGITUD en «mm» ?

*El primer paso consiste en elegir el tamaño adecuado, que debe coincidir con la distancia que haya entre la comisura bucal y el ángulo de la mandíbula (mm). Para su colocación el facultativo debe realizar una hiperextensión cervical, abriendo la boca de la víctima con los dedos índice y pulgar de la mano que no sujeta la cánula, y procediendo seguidamente a introducir ésta, rotada 180° con respecto a la que será su posición definitiva, es decir, la parte cóncava dirigida hacia el paladar, girándola progresivamente según se va introduciendo en la boca hasta dejarla en su posición definitiva, evitando en todo momento desplazar la lengua hacia atrás. Una vez ubicada, el facultativo deberá comprobar su permeabilidad, realizando insuflaciones y comprobando si se desplaza el tórax del paciente.*



STERILE

EO

CE

1434

**Atención:** En caso de reutilización, se corre grave riesgo de infección como de funcionamiento incorrecto del producto por pérdida de funcionalidad

**Uso exclusivo por personal sanitario cualificado.**

**NO UTILIZAR SI EL ENVASE NO ESTA INTEGRO**

En caso de incidente adverso por malfuncionamiento del dispositivo, ponerse en contacto con el Fabricante y/o Autoridades Sanitarias