


Tubos de Guedel

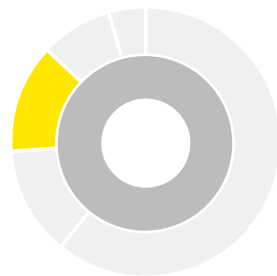

REV.B.190517

1/2



NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



REFERENCIAS

00110000
00110001
00110002
00110003
00110004
00110005
00110010
00110011
00110015
00110207
00110208
00110209
00110210
00110211
00110212
00110304
00110305
00110306
00110307
00110308
00110309
00110310
00110311
00110312

Opacos “Rígidos” y transparentes “blandos”

Descripción:

El tubo de Guedel ó cánula de mayo es un dispositivo de material plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire. Se emplean para anestesia en general para mantener abiertas las vías orofaríngeas. Quirosa dispone de nueve medidas, el modelo opaco rígido fabricado en plástico HDPE y el modelo transparente fabricado en plástico PVC y blando con el fin de proteger los tejidos. No contienen Látex en su composición. Poseen un refuerzo en color de nylon para identificar y evitar su obstrucción, también lleva inscrito en número su longitud en centímetros.

Modelos:

Opacos “Rígidos” y transparentes “blandos”



Instrucciones de uso:

El primer paso consiste en elegir la de un tamaño adecuado, que debe coincidir con la distancia que haya entre la comisura bucal y el ángulo de la mandíbula. Para su colocación el facultativo debe realizar una hiperextensión cervical, abriendo la boca de la víctima con los dedos índice y pulgar de la mano que no sujeta la cánula, y procediendo seguidamente a introducir ésta, rotada 180° con respecto a la que será su posición definitiva, es decir, la parte cóncava dirigida hacia el paladar, girándola progresivamente según se va introduciendo en la boca hasta dejarla en su posición definitiva, evitando en todo momento desplazar la lengua hacia atrás. Una vez ubicada, el facultativo deberá comprobar su permeabilidad, realizando insuflaciones y comprobando si se desplaza el tórax de la víctima.

Dimensiones y medidas: Modelo opaco

ref. num.	descripción	long	num.	color	boquilla	anchura*	ud/bolsa	ud/caja
11.00.11	TUBO DE GUEDEL	40 mm.	000	●	25 mm.	12 mm.	50	1000
11.00.00	TUBO DE GUEDEL	50 mm.	00	●	44 mm.	13 mm.	50	1000
11.00.10	TUBO DE GUEDEL	60 mm.	0	●	30 mm.	15 mm.	50	600
11.00.01	TUBO DE GUEDEL	70 mm.	1	○	38 mm.	17 mm.	50	500
11.00.15	TUBO DE GUEDEL	80 mm.	1,5	●	40 mm.	18 mm.	50	400
11.00.02	TUBO DE GUEDEL	90 mm.	2	●	41 mm.	20 mm.	50	400
11.00.03	TUBO DE GUEDEL	100 mm.	3	●	42 mm.	22 mm.	50	400
11.00.04	TUBO DE GUEDEL	110 mm.	4	●	42 mm.	23 mm.	25	350
11.00.05	TUBO DE GUEDEL	120 mm.	5	●	44 mm.	24 mm.	25	200

La longitud del Guedel se realiza desde la boquilla hasta el final del tubo en línea recta, la altura de la cánula.

Dimensiones y medidas: Modelo transparente

ref. num.	descripción	long	num.	colour	boquilla	anchura*	ud/bolsa	ud/caja
11.03.11	TUBO DE GUEDEL	40 mm.	000	●	25 mm.	12 mm.	50	1000
11.03.00	TUBO DE GUEDEL	50 mm.	00	●	44 mm.	13 mm.	50	1000
11.03.10	TUBO DE GUEDEL	60 mm.	0	●	30 mm.	15 mm.	50	600
11.03.01	TUBO DE GUEDEL	70 mm.	1	○	38 mm.	17 mm.	50	500
11.03.15	TUBO DE GUEDEL	80 mm.	1,5	●	40 mm.	18 mm.	50	400
11.03.02	TUBO DE GUEDEL	90 mm.	2	●	41 mm.	20 mm.	50	400
11.03.03	TUBO DE GUEDEL	100 mm.	3	●	42 mm.	22 mm.	50	400
11.03.04	TUBO DE GUEDEL	110 mm.	4	●	42 mm.	23 mm.	25	350
11.03.05	TUBO DE GUEDEL	120 mm.	5	●	44 mm.	24 mm.	25	200

La longitud del Guedel se realiza desde la boquilla hasta el final del tubo en línea recta, la altura de la cánula.

PRODUCTOS DE EMERGENCIA




Pol. Ind. Santa Mª Artés -
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA -
SPAIN - EUROPE ·
t: +34 93.830.58.14 ·
f: +34 93.830.59.54 ·
www.quirosa.com ·
info@quirosa.com




2/2



NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

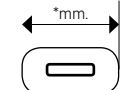

*: anchura exterior boquilla

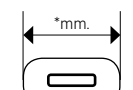

*: anchura exterior boquilla

NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.