


Cánula de autotoma

para detección del HPV

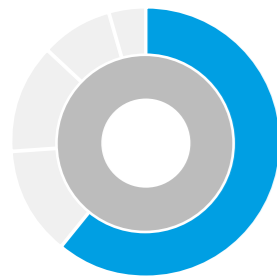

REV.A150218

1/2



STERILE EO



REFERENCIAS

00180101
00180101_E
00180102
00180102_E

“IUNETEST”

Descripción:

IUNETEST es un dispositivo médico para recoger células del cuello uterino. Se emplea a modo de tampón vaginal y una vez obtenida la muestra, esta se remite a un laboratorio de análisis. Allí se realizará un test de detección de ADN del VPH y se informará a la mujer si es portadora o no del virus del papiloma humano. Ser portadora no indica que tengas una lesión pero sí la necesidad de ser tratada por un profesional ginecólogo.

PRINCIPALES MOTIVOS DE USO

La técnica de análisis de detección del VPH (PCR) utilizada sobre la muestra obtenida por el dispositivo IUNE es más eficaz que la citología, además el dispositivo IUNE recoge una muestra muy representativa. IUNE es la mejor alternativa para aquellas mujeres que se sienten incómodas durante el procedimiento para la toma citológica o que no tienen tiempo para ir a su consulta. Utilizar IUNE es sencillo, cómodo y eficaz.

Ventajas de IUNE frente a la toma tradicional para la citología para la prevención del VPH

- Evita las molestias producidas por la introducción del espéculo vaginal durante la exploración ginecológica.
- Es mucho más cómodo, puedes realizar la prueba en tu propia casa, cuando quieras.
- No hay que perder tiempo en visitas médicas.
- La prueba de detección de ADN del HPV es más eficaz que la citología convencional en la detección del VPH.
- Será recomendable que acudas al ginecólogo o médico si la prueba es positiva
- El test de VPH realizado sobre la muestra obtenida con IUNE tiene una sensibilidad entorno al 90%, por lo que es un procedimiento ideal para llevar a cabo prevención del VPH y por lo tanto, de cáncer de cuello uterino.



00180101_E
CANULA IUNE HPV TEST CON ESTUCHE

IUNE es un dispositivo médico para recoger células del cuello uterino. Se emplea a como un tampón vaginal y una vez utilizado se remite a un laboratorio de análisis
En nuestra página www.iunehpv.com también dispone de videos y instrucciones de su funcionamiento.

Instrucciones de uso:



1. Higiene: Lavarse las manos con agua y jabón neutro. Retire el envoltorio protector del dispositivo y compruebe que el dispositivo está íntegro y que no tiene ninguna rotura o defecto. El dispositivo de plástico está formado por dos tubos, uno dentro de otro.



2. Inserción en la vagina: Introducir por el extremo opuesto al mango con forma de flor, como si se tratase de un tampón vaginal, sujetando con una mano por su extremo posterior y con la otra mano para ayudarse en la maniobra.



3. Deslizamiento: Una vez introducido en la vagina, mediante una ligera presión, empujar el émbolo hacia el interior de su cuerpo. De esta manera el dedal queda en contacto con el cuello uterino.



4. Recolección: Realizar 2 o 3 giros sujetando el dispositivo con una sola mano por la parte que queda en el exterior de la vagina. Las células del cuello uterino quedaran adheridas a la superficie del dedal recolector. Una vez hecho esto ya se puede retirar el producto de la vagina.



5. Protección del dedal recolector: Tapar el dedal recolector del dispositivo por el extremo con el tapón adjunto, preservando de esa manera las células recogidas.



6. Identificar dispositivo: Utilizar la etiqueta larga tipo "A" para identificar el dispositivo envolviendo la parte final del émbolo como se muestra en la imagen.



7. Identificar la bolsa: Pegar la etiqueta tipo "C" en el exterior de la bolsa transparente adjunta. Introducir el dispositivo en su interior y cerrarla despegando el adhesivo de la solapa.

ANÁLISIS EN LABORATORIO
Entregar la muestra al laboratorio para realizar su análisis VPH y posterior informe.



Dedal con estrías para una óptima recolección de células.



Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	L1	L2	L3	Ø D1	Ø D2	caja
18.01.01	CANULA IUNETEST HPV ESTERIL	150mm	105mm	18mm	12mm	17mm	100
18.01.02	CANULA IUNETEST HPV	150mm	105mm	18mm	12mm	17mm	100
18.01.01_E	CANULA IUNETEST HPV ESTUCHE ESTERIL	150mm	105mm	18mm	12mm	17mm	25
18.01.02_E	CANULA IUNETEST HPV ESTUCHE	150mm	105mm	18mm	12mm	17mm	25

Presentación:

Envasados individualmente en peel-pack.
En cajas de 25/100 unidades según modelo.

IUNETEST® marca registrada por Self Test Technologies, S.L. Todos los derechos reservados. www.iunetest.com

PRODUCTOS
UN SOLO USO



Pol. Ind. Santa Mª Artés -
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA -
SPAIN - EUROPE ·
t: +34 93.830.58.14 ·
f: +34 93.830.59.54 ·
www.quirosa.com ·
info@quirosa.com



2/2