


Mascarillas reanimación

boca-boca

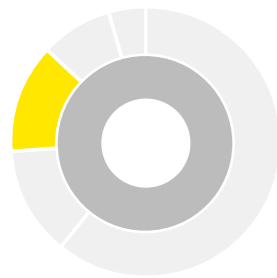

REV.B.190517

1/4



NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



REFERENCIAS

00210001
00210002
00210003
00210004
00210005
00210006
00210007

MASCARILLAS BOCA-BOCA “PRIMEROS AUXÍLIOS”

Descripción:

Máscara para efectuar la respiración boca-boca al auxiliado. Se compone de una válvula anti-retorno entre la mascarilla y el tubo de respiración. Mascarillas para resucitador manual (balón de reanimación) y anestesia, hinchables con válvula de seguridad, de pvc anti alérgicas, compatibles con equipos de ventilación asistida. (Reanimadores manuales). Resucitador/Reanimador manual de fácil manejo.

Modelos:

CPR, Bolsillo, Handy-Type



Instrucciones de uso genéricas

MODO DE EMPLEO:

Coloque a la persona auxiliada boca arriba con la cabeza hacia atrás de forma que su barbilla quede en una posición elevada respecto de su frente. Es conveniente colocar una manta enrollada, cojín o la misma mano, debajo de sus hombros para que la abertura de los conductos respiratorios sea óptima. Una vez abiertas y despejadas las vías respiratorias del auxiliado, colocar el equipo de válvula/máscara sobre la nariz y la boca de la víctima, y comience inmediatamente la respiración artificial con un ritmo inicial de 2 insuflados lentos (de 1 a 1,5 segundos de duración cada uno) en la boquilla, seguido de 10 a 15 insuflados por minuto. Esto debería inflar los pulmones de la víctima y ensanchar la cavidad torácica, haciendo que el aire espirado de la víctima se escape por el orificio lateral de la válvula.

ADVERTENCIA:

“QUIROSA, S.A.” no se hace responsable del mal funcionamiento, daños o desperfectos que resulten de la alteración, almacenaje indebido, o bajo condiciones ambientales adversas, así como el empleo incorrecto de la mascarilla por personal no cualificado.



Instrucciones específicas



1. Escoger la mascarilla del tamaño adecuado. Montar la mascarilla con la válvula y la boquilla.



2. Ajustar el resucitador sobre la nariz y boca del paciente y colocar la cinta elástica. Sujetar la mascarilla con firmeza mientras se inclina hacia atrás la cabeza del paciente para facilitar el paso del aire.




3. Hacer dos expiraciones lentas y vigilar la subida del tórax del paciente. Cuando baje el tórax, proseguir con un ciclo de expirador regular de 10 a 15 veces por minuto.

EN CASO DE NIÑOS LA EXPIRADA DEBE SER MÁS PEQUEÑAS FRECUENTE

PRODUCTOS DE EMERGENCIA




Pol. Ind. Santa Mª Artés -
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA -
SPAIN - EUROPE ·
t: +34 93.830.58.14 ·
f: +34 93.830.59.54 ·
www.quirosa.com ·
info@quirosa.com

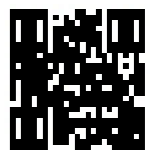

2/4



NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

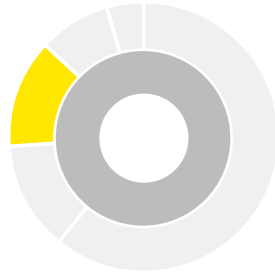

REV.B.190517

3/4



NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



REFERENCIAS

- 00210001
- 00210002
- 00210003
- 00210004
- 00210005
- 00210006
- 00210007

MODELO CPR
MASCARILLA REANIMACIÓN CPR /ESTUCHE

Descripción:

Mascarilla que sirve tanto para adultos como para niños. Con conector para oxígeno. No contiene Latex. Válvula de aislamiento total. Desmontable y esterilizable.



21.00.01/21.00.02
Mascarilla Reanimación CPR



21.00.02
Mascarilla Reanimación CPR con estuche



21.00.06
TUBO ALARGO 6" MASCARILLA CPR (opcional)



21.00.07
BOQUILLA MASCARILLA CPR 18mm (opcional)



21.00.08
ADAPTADOR TUBO MASCARILLA CPR (opcional)

Referencias y medidas:

| ref. num. | descripción | MODELO | CAJA EMBALAJE |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 21.00.01 | MASCARILLA REANIMACION | CPR | 160 |
| 21.00.02 | MASCARILLA REANIMACION | CPR CON ESTUCHE | 128 |
| 21.00.06 | TUBO 6" ALARGADOR BOQUILLA | CPR (Accesorio) | 1 |
| 21.00.07 | BOQUILLA MASCARILLA | CPR (Accesorio) | 1 |
| 21.00.08 | ADAPTADOR TUBO A MASCARILLA | CPR (Accesorio) Apto ref. 210006 | 1 |

Presentación:
Por unidades

MODELO BOLSILLO
MASCARILLA REANIMACIÓN

Descripción:

Dispositivo de reanimación compuesto por una lámina plástica y válvula antirretorno. De un solo uso. Constituye una barrera eficaz frente posibles infecciones o contaminaciones. Material: plástico. No contiene Latex. Válvula de flujo de aire unidireccional. Tamaño plegada: 5 x 5 x 1,5cm. Tamaño desplegada: 20 x 20cm. Tamaño Estuche: 10 x 10cm. Muy fácil de utilizar. Un solo uso.



21.00.03
Mascarilla Boca-Boca Envase en cajita cartón



21.00.04
Mascarilla Boca-Boca con estuche llavero

Referencias y medidas:

| ref. num. | descripción | MODELO | CAJA EMBALAJE |
|-----------|------------------------|----------------------|---------------|
| 21.00.03 | MASCARILLA REANIMACION | BOLSILLO | 100 |
| 21.00.04 | MASCARILLA REANIMACION | BOLSILLO CON ESTUCHE | 200 |

Presentación:
Por unidades

MODELO HANDY-TYPE
MASCARILLA REANIMACIÓN

Descripción:

Material: plástico. No contiene Latex. Válvula de flujo de aire bidireccional. (Tejido). Tamaño plegada: 2 x 2 x 0,4cm. Tamaño desplegada: 30 x 20cm. Tamaño Envase: 6 x 6 x 0,5cm. Muy fácil de utilizar. Un solo uso.



21.00.05
Mascarilla Handy-Type Envase en blister

Referencias y medidas:

| ref. num. | descripción | MODELO | CAJA EMBALAJE |
|-----------|------------------------|------------|---------------|
| 21.00.05 | MASCARILLA REANIMACION | HANDY TYPE | 200 |

Presentación:
Por unidades

PRODUCTOS DE EMERGENCIA



Pol. Ind. Santa Mª Artés -
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA -
SPAIN - EUROPE ·
t: +34 93.830.58.14 ·
f: +34 93.830.59.54 ·
www.quirosa.com ·
info@quirosa.com



4/4



NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.